

Lubricare 2

Entretien rapide,
efficient et économique



Lubricare 2 effectue la maintenance des pièces à main (lubrification et nettoyage), ce qui est essentiel pour un travail quotidien. Il est possible d'entretenir automatiquement jusqu'à 4 pièces à main en un temps très court puisque la quantité de lubrifiant et la durée d'entretien de chaque pièce sont programmées dans Lubricare 2. Le système d'injection d'air assure la lubrification et le nettoyage complet de l'intérieur de la pièce à main, et permet un entretien homogène en évitant les manques qui peuvent survenir lors d'une lubrification manuelle. Lubricare 2 est compatible avec plusieurs marques de lubrifiants.

NEW

Lubricare 2

Bien Air
Dental

>>> Jusqu'à quatre pièces
à main en peu de temps

 **SEULEMENT 20 SEC.**

Grâce aux différents modes de fonctionnement préprogrammés adaptés spécifiquement à chaque pièce à main, Lubricare 2 peut effectuer automatiquement l'entretien de quatre pièces à main maximum en peu de temps. Lubricare 2 élimine efficacement le surplus d'huile, ce qui permet un entretien rapide. Il nettoie une turbine en 20 secondes environ et un contre-angle en 40 secondes.

>>> **Entretien économique**

4X moins de consommation d'huile

En utilisant Lubricare 2, la consommation d'huile est réduite de 25% par rapport à une procédure manuelle, ce qui permet une maintenance plus rapide et économique.

>>> **Système Clean Airblow**

En utilisant le système de double électrovannes et un conduit dédié à l'air propre, le système peut fournir de l'air propre sans mélange d'huile. Pendant le processus d'élimination de l'eau avant la lubrification, le système élimine l'eau dans la tête, ce qui maximise les résultats de la lubrification et minimise la période d'inactivité avant la pratique.



>>> **Nettoyage facilité**

Le panneau de commande est lisse afin de faciliter le nettoyage et la porte peut être retirée pour un meilleur accès. Lubricare 2 intègre un mécanisme d'aspiration des vapeurs d'huile pour empêcher la diffusion d'aérosols lors de son utilisation.

>>> **Spraynet®**
son meilleur compagnon

 **99.99 % de réduction
de la charge microbienne**

Pour obtenir de meilleurs résultats, Bien-Air recommande vivement l'utilisation de Spraynet®, dont il est prouvé qu'il réduit 99,99% de la charge microbienne.



>>> **Compatibilité total**

Lubricare 2 est compatible avec toutes les turbines et pièces à main électriques de Bien-Air, Lubrifluid et Spraynet, ainsi qu'avec les pièces à main et les produits de nettoyage ou de lubrification d'autres fabricants. Des raccords et un support de pulvérisation supplémentaires peuvent être nécessaires pour utiliser des produits non fournis par Bien-Air.

S W I S S  M A D E

SPRAYNET® 99.99 % de réduction de la charge microbienne



Uniquement pour ré
Einzig für Reini
Exclusively for cle
Únicamente para
Unicamente per pul
Только для очист

Tous les composants correspondants
copées ou des normes alimentaires
entsprechen den gängigen Pharma
forderungen. All components comp
or food grade standards. Todos
las exigencias actuales de farmacia
Tutti i componenti sono conformi
o norme alimentari. Все соответс
фармакопей и действующих норма

Extérieur-Aussen-Exterior-Exter
cloth-Exterior con un trap-Exterior
поверхности с использованием
Appareillages, moteurs électro
Instrumente, Elektromotoren, Sch
Instruments, electric motors, hese
Instrumentación, motores eléctric
Apparecchiatura, motori elettrici, c
Приборы, электромоторы, щитов

Extérieur-Aussen-Exterior-Exter
поверхности
Turbines, pièces à main, contre-
Turbinen, Hand- und Winkelstü
Turbines, hand-pieces, contra-
Turbines, piezas de mano, contra-
Turbine, diritti e contrangoli
Турбины, прямые и угловые на

Intérieur-Innenseite-Interior-Inter
поверхности
Turbines, pièces à main, contre-
Turbinen, Hand- und Winkelstü
Turbines, hand-pieces, contra-
Turbines, piezas de mano, contra-
Turbine, diritti e contrangoli
Турбины, прямые и угловые на

Parce que la sécurité du patient a toujours été notre priorité, les instruments Bien-Air ont été spécialement conçus afin de protéger vos patients des contaminations croisées. Notre gamme de produits de maintenance vous offre la garantie d'une hygiène impeccable et d'une longévité optimale pour vos instruments Bien-Air.

Aujourd'hui plus que jamais, notre Spraynet® (exclusivité Bien-Air) est votre allié.

Pour plus d'informations sur les produits d'entretien Bien-Air: www.maintenance.bienair.com