

**IMPLANTOLOGY
ORAL SURGERY**

motor systems by Bien-Air



PURE SIMPLICITÉ

S W I S S  M A D E



NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY
motor system

NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGY
motor system

ORAL SURGERY
motor system

NEW CHIROPRO & CHIROPRO PLUS

Simplicité. Voici le maître-mot de la nouvelle gamme des systèmes moteurs d'implantologie et de chirurgie orale développée par Bien-Air Dental. Lors de la conception de ces deux systèmes, tout a été pensé afin d'en faciliter l'utilisation, jusque dans les moindres détails.

Différents par leurs domaines d'application, les systèmes **Chiropro** et **Chiropro PLUS** partagent la même simplicité d'utilisation.

S W I S S  M A D E

PRÉCISION ABSOLUE

Grâce à un système électronique de haute précision, le couple sélectionné sur la console correspond exactement au couple obtenu à la sortie de votre instrument*. Aucune calibration supplémentaire n'est donc requise. C'est aussi simple qu'il y paraît.

SÉQUENCES OPÉRATOIRES PRÉPROGRAMMÉES

Grâce aux séquences opératoires préprogrammées, réalisez vos interventions en un minimum de temps. En fonction des données cliniques de votre patient, déterminez le nombre de séquences nécessaires à la réalisation de votre intervention – 3, 4 ou 5. Les paramètres de chaque étape sont alors automatiquement affichés. Vous pouvez maintenant réaliser votre opération, tout simplement.

INTERFACE CLAIRE ET CONCISE

Sobre et simple, l'écran vous donne accès en un coup d'œil à toutes les informations essentielles au bon déroulement de votre intervention : type d'instruments, vitesse, couple, débit d'irrigation et sens de rotation.

PURE SIMPLICITÉ

NAVIGATION INTUITIVE

Grâce à son bouton de commande unique, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression. Vous avez dit simplicité ?

SIMPLE, JUSQUE DANS L'ENTRETIEN

Le bouton de commande peut être facilement retiré de la console et stérilisé. De plus, la zone de contrôle est protégée par un verre hautement résistant et facile à nettoyer. La simplicité se cache aussi dans les détails.

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY
motor system

NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGY
motor system

ORAL SURGERY
motor system

* Selon les tests effectués dans le laboratoire de recherche de Bien-Air Dental, les valeurs de couple affichées sur les systèmes Bien-Air Dental sont considérablement plus précises (marge d'erreur de +/- 5%) que celles affichées sur les systèmes des concurrents (marge d'erreur de +/- 10%).

NEW CHIROPRO

Dentiste généraliste ou spécialiste en implantologie, vous recherchez une solution simple, rapide et efficace pour vos interventions d'implantologie ?

Le **Chiropro** est la solution idéale pour une pose d'implant précise et sans à-coups.

IMPLANTOLOGIE

Pilotée par le **Chiropro**, la combinaison nouveau micromoteur MX-i et contre-angle CA 20:1 vous offre le meilleur de la technologie rotative pour toutes vos interventions d'implantologie.

Couplé au micromoteur MX-i, le contre-angle CA 20:1 (également disponible en version Kirschner/Meyer et Micro-Series) assure une stabilité de la vitesse hors pair, pour des interventions précises et sans à-coups. Pièce-à-main d'implantologie la plus durable du marché*, le contre-angle CA 20 :1 est doté d'un système d'irrigation interne inédit. Ainsi, vous n'êtes pas gêné par la ligne d'irrigation lorsque vous avez l'instrument en main. Facilitées, vos procédures peuvent être réalisées en toute confiance.



PURE SIMPLICITÉ

IMPLANTOLOGY
motor system



S W I S S  M A D E

* Selon les tests effectués dans le laboratoire de recherche de Bien-Air Dental, le système d'entraînement du contre-angle CA 20 :1 a été optimisé pour supporter plus de 1600 interventions à 70 Ncm. Il en résulte une durée de vie considérablement prolongée.

NEW CHIROPRO PLUS

En plus de l'implantologie, les interventions de chirurgie orale font également partie de votre quotidien ?

Découvrez le **Chiropro PLUS**, spécialement créé pour les chirurgiens-dentistes et les chirurgiens maxillo-facial.

Grâce à ses multiples combinaisons possibles, le **Chiropro PLUS** est le système parfait pour réaliser l'ensemble de vos interventions de parodontologie et de chirurgie orale.

CHIRURGIE ORALE

(y compris extraction de dents de sagesse)


Combiné à la pièce-à-main droite PM 1:2 et au micromoteur MX-i PLUS, le **Chiropro PLUS** est la solution parfaite pour vos interventions de chirurgie orale et notamment l'extraction de dents de sagesse.

Grâce à la puissance élevée de la PM 1:2, la durée de coupe est réduite de 70 % (12 secondes pour sectionner entièrement une dent) et la force requise est nettement diminuée. Le risque de surchauffe est considérablement réduit grâce au système d'auto-ventilation intégré du MX-i PLUS.

CHIRURGIE ORALE & PARODONTOLOGIE

Vous pouvez également réaliser vos interventions de chirurgie orale et de parodontologie grâce à la combinaison **Chiropro PLUS**, micromoteur MX-i PLUS et nouveau contre-angle CA 1:2.5.

Alors que la forme angulaire du contre-angle s'avère plus adaptée qu'une pièce-à-main droite selon la zone opératoire ciblée, le couple important du MX-i PLUS et son système d'auto-ventilation intégré assurent une intervention rapide et sans surchauffe de l'instrument, même lors d'opérations longues et complexes. Travaillez en toute sécurité !

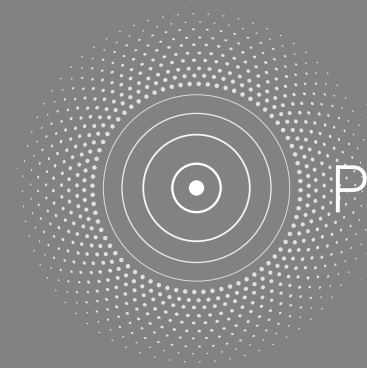

PURE SIMPLICITÉ

IMPLANTOLOGY
motor system

ORAL SURGERY
motor system



S W I S S  M A D E

NEW Contre-angle CA 1:2.5

Le nouveau CA 1:2.5 Micro-Series est le contre-angle de chirurgie et de parodontie par excellence.

Grâce à son rapport multiplicateur, le CA 1:2.5 Micro-Series peut être utilisé pour de nombreuses applications cliniques : extraction de dents de sagesse, apicectomie, élongation coronaire et l'hémisection.

micro
SERIES

Apicectomie


Extraction de dents de sagesse

Élongation coronaire

Hémisection



Grâce au passage de la ligne d'irrigation à l'intérieur du CA 1:2.5 Micro-Series, vous êtes libre de vos mouvements et ne ressentez aucune gêne lors du maniement de l'instrument.

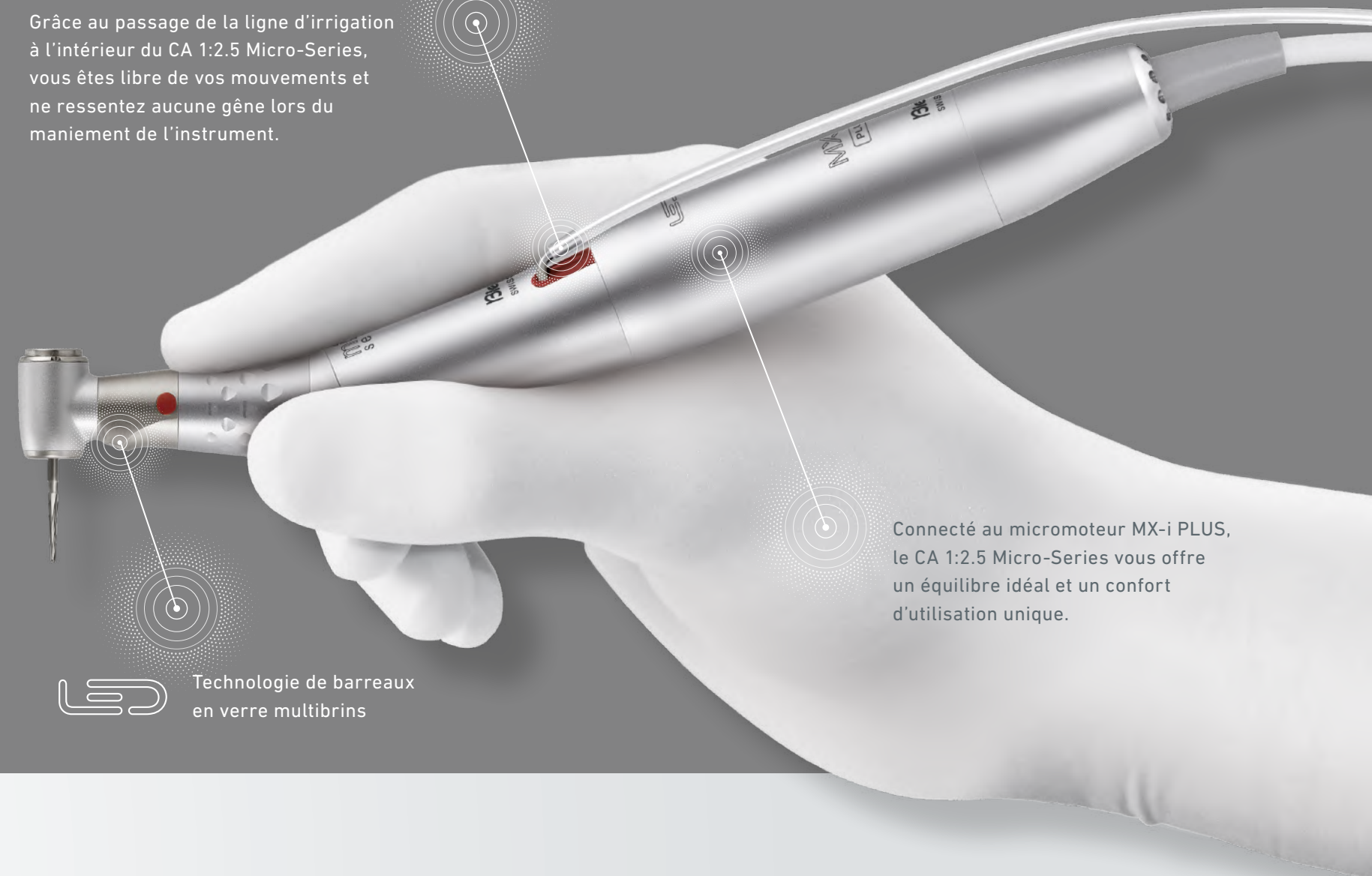

Connecté au micromoteur MX-i PLUS, le CA 1:2.5 Micro-Series vous offre un équilibre idéal et un confort d'utilisation unique.



Technologie de barreaux
en verre multibrins

Polyvalent
et ergonomique

S W I S S  M A D E

NEW CHIROPRO

NEW CHIROPRO



NEW CHIROPRO + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO 3rd GEN REF 1700708-001



- ✓ Navigation intuitive
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements
à billes en céramique
3 ans de garantie
- ✓ Couple maximum 70 Ncm

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro 3rd Gen
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

NEW CHIROPRO avec 1 contre-angle CA 20:1 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO 3rd GEN REF 1700707-001



- ✓ Navigation intuitive
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series
2 ans de garantie
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements
à billes en céramique
3 ans de garantie
- ✓ Couple maximum 70 Ncm

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro 3rd Gen
- 1 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

NEW CHIROPRO avec 2 contre-angles CA 20:1 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO 3rd GEN REF 1700707-001
+ 1 x CA 20:1L MICRO-SERIES REF 1600692-001



- ✓ Navigation intuitive
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series
2 ans de garantie
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements
à billes en céramique
3 ans de garantie
- ✓ Couple maximum 70 Ncm

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro 3rd Gen
- 2 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

NEW CHIROPRO PLUS

NEW CHIROPRO PLUS



NEW CHIROPRO PLUS + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO PLUS 3rd GEN REF 1700710-001



- ✓ **Navigation intuitive**
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Micromoteur MX-i LED PLUS autoventilé avec roulements à billes en céramiques**
3 ans de garantie
- ✓ **Couple maximum 80 Ncm**

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro PLUS 3rd Gen
- 1 x micromoteur MX-i LED PLUS 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED PLUS 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

PACK IMPLANTOLOGY

NEW CHIROPRO PLUS avec 1 contre-angle CA 20:1 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO PLUS 3rd GEN REF 1700709-001



- ✓ **Navigation intuitive**
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series**
2 ans de garantie
- ✓ **Micromoteur MX-i LED PLUS autoventilé avec roulements à billes en céramiques**
3 ans de garantie
- ✓ **Couple maximum 80 Ncm**

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro PLUS 3rd Gen
- 1 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED PLUS 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED PLUS 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

PACK ORAL SURGERY

NEW CHIROPRO PLUS avec 1 contre-angle CA 1:2.5 L + pack de maintenance OFFERT

1 x SET CHIROPRO PLUS 3rd GEN REF 1700751-001



- ✓ **Navigation intuitive**
un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Contre-angle lumière CA 1:2.5 L Micro-Series**
1 an de garantie
- ✓ **Micromoteur MX-i LED PLUS autoventilé avec roulements à billes en céramiques**
3 ans de garantie
- ✓ **Couple maximum 80 Ncm**

Le pack comprend :

- 1 x console Chiropro PLUS 3rd Gen
- 1 x contre-angle lumière CA 1:2.5 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED PLUS 3rd Gen avec 3 ans de garantie
- 1 x câble MX-i LED PLUS 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main
- 5 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection
- 1 x Trio pack de maintenance

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES

NEW

CONTRE-ANGLE AVEC LUMIÈRE CA 1:2.5 L

1 x CONTRE-ANGLE CA 1:2.5 L MICRO-SERIES
REF 1601055-001



- Ratio 1:2.5 - pour vos interventions de chirurgie et de parodontie
- Technologie d'irrigation brevetée
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Multiplicateur 1:2.5 - vitesse maximale 100,000 rpm
- Résistance élevée à la corrosion

CONTRE-ANGLE AVEC LUMIÈRE CA 20:1 L

1 x CONTRE-ANGLE CA 20:1 L MICRO-SERIES
REF 1600692-001
OU 1 x CONTRE-ANGLE CA 20:1 L STANDARD
REF 1600598-001



- Technologie d'irrigation brevetée
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Résistance élevée à la corrosion

PM 1:1 SPRAY EXTERNE

1 x PM 1:1 REF 1600052-001



- Spray externe
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage

PM 1:2 SPRAY EXTERNE

PM 1:2 REF 1600436-001



- Douille avec tube d'irrigation et bague de serrage
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Jusqu'à 80'000 Rpm
- Sans éclairage

KIT MOTEUR MX-i + CABLE (POUR NEW CHIROPRO 3rd GEN)

SET MX-i LED + CABLE MX-i LED REF 1700744-001

AVEC:
1 x MICROMOTEUR MX-i LED 3rd GEN REF 1601008-001
1 x CABLE MX-i LED 3rd GEN REF 1601009-001



KIT MOTEUR MX-i PLUS + CABLE (POUR NEW CHIROPRO PLUS 3rd GEN/iCHIROPRO/CHIROPRO L)

SET MX-i LED PLUS + CABLE MX-i LED PLUS REF 1700758-001

AVEC:
1 x MICROMOTEUR MX-i LED PLUS 3rd GEN REF 1600755-001
1 x CABLE MX-i LED PLUS 3rd GEN REF 1601069-001



BOUTON DE COMMANDE (POUR NEW CHIROPRO 3rd GEN)

1 x BOUTON DE COMMANDE CHIROPRO 3rd GEN
REF 1307031-001



Bouton de commande stérilisable

LIGNES D'IRRIGATION JETABLES

10 x LIGNES D'IRRIGATION
REF 1500984-010

10 x LIGNES D'IRRIGATION
KIRSCHNER/MEYER
REF 1501635-010



Set de 10 lignes d'irrigation stériles à usage unique

FILMS DE PROTECTION STÉRILES

10 x FILMS DE PROTECTION STÉRILES iPad
REF 1501746-010

ou 10 x FILM DE PROTECTION STÉRILE
CHIROPRO 3rd GEN
REF 1502329-010



Set de 10 films stériles à usage unique

S W I S S  M A D E

WWW.BIENAIR.COM



PURE SIMPLICITÉ

NEW CHIROPRO

WWW.BIENAIR.COM