

E10

FR

Puissant et connecté,
pour une stérilisation de
pointe



Euronda®
Pro System

E10

Puissant et connecté, pour une stérilisation de pointe

6	E10
8	Technologies et solutions Euronda Pro System
10	Interface innovante Cycles Entretien
14	Cycles de stérilisation et programmes de test Cycles de type B Cycles de type S et N
18	Capacité de chargement Accessoires en option
20	Traçabilité complète et intégrée E-Memory et E-Data
23	Tests de contrôle
24	E-Bot
26	Systèmes de traitement de l'eau Aquafilter Pro Aquafilter 1 to 1 Aquadist Accessoires pour systèmes de traitement de l'eau
30	Caractéristiques techniques
31	Fiche technique

Euronda Pro System

Product, Process, Protection



Nettoyage



Bacs à ultrasons

Eurosonic 4D
Eurosonic 3D
Eurosonic Energy



Bacs multifonctions

Eurosafe Smart



Thermodésinfecteurs

Eurosafe 170
Eurosafe 60

Conditionnement



Thermosoudeuses

Euromatic
Euroseal Valida
Euroseal Infinity
Euroseal

Euronda Pro System est le système de protection développé pour garantir un protocole de retraitement des instruments complet et efficace afin de protéger la sécurité des opérateurs, des patients et de l'environnement de travail.

La stérilisation est un procédé qui s'articule en plusieurs phases et son succès dépend de la bonne exécution de chaque étape, de la collecte au stockage. Grâce à la ligne Euronda Pro System, il est possible d'appliquer de façon simple, efficace et reproductible dans le temps un protocole de stérilisation avancé et traçable qui renforce la sécurité et optimise les ressources du cabinet.



Stérilisation



Autoclaves

E10
EXL
E9
E8



Traitement de l'eau

Aquafilter Pro
Aquafilter 1 to 1
Aquadist



Tests de contrôle



Systèmes de traçabilité

Interface intuitive

L'interface a été conçue avec une logique simple et intuitive. Le démarrage rapide des cycles par glissement, la possibilité de les personnaliser en quelques clics et les tutoriels vidéos guidant l'utilisateur à travers les petites procédures d'entretien courant simplifient l'utilisation quotidienne de l'appareil.

Traçable

Les données de stérilisation peuvent être sauvegardées sur une clé USB et transférées sur un PC via une connexion Ethernet ou WiFi. L'archive des cycles est facilement accessible et consultable à partir du menu, avec la possibilité de générer un PDF récapitulatif pratique contenant toutes les informations sur les cycles effectués.

Design haut de gamme

Sa forme compacte et le blanc de sa coque mettent en valeur les couleurs de l'écran 7". La LED colorée située sur le côté de la poignée sert de guide lumineux, fournissant un feedback immédiat sur l'état de l'appareil ou sur la phase du cycle de stérilisation, assurant également une meilleure visibilité des plateaux lors du chargement et du déchargement.

Performant

La pompe à vide et le système de séchage de dernière génération garantissent une stérilisation performante et silencieuse. Les filtres à air empêchent la saleté de pénétrer dans l'autoclave, préservant ainsi les composants internes et leur efficacité dans le temps.



E10

Puissant et connecté, pour une stérilisation de pointe



Autoclave intuitif, traçable et performant : permet une gestion complète des données de stérilisation, grâce aux meilleurs systèmes de traçabilité numérique et papier. Son interface intuitive, avec un écran couleur de 7" et sa LED colorée à côté de la poignée, simplifie et accélère les opérations quotidiennes.

Offre la possibilité de sélectionner cinq cycles différents de type B et, après avoir saisi un mot de passe, un cycle de type S et N. Il est également possible de programmer des tests, de façon à exploiter au mieux le temps utile.

Dans E10, tout est conçu pour être à portée de main : le compartiment des imprimantes est facile d'accès, les filtres à air sont amovibles pour le nettoyage et le remplacement en un seul clic, les opérations de réglage du hublot avant et de déverrouillage de la porte sont simples et immédiates.

Toutes les informations sur la stérilisation peuvent être transférées sur PC via USB, Ethernet et WiFi et gérées via les logiciels E-Data et E-Memory.

Il est également possible d'installer à tout moment trois Print Set optionnels différents pour imprimer sur papier thermique ou étiquettes autocollantes avec des données ou des codes-barres.

Notre assistant IA, E-Bot, soutient en temps réel les opérateurs dans la gestion de l'autoclave et du processus de stérilisation, complétant l'équipement numérique.

Accessoires fournis

Porte-plateaux standard et cinq plateaux, tuyaux de vidange, éponge, poignée d'extraction du plateau, clé pour le réglage de la porte, entonnoir, filtre bactériologique, USB.



Classification

Dispositif Médical
de Classe IIb, CE0051



Dimensions

46 x 45,5 x 61 cm (l x h x p)



Poids

47,5 kg (18 L) - 50,5 kg (24 L)
(appareil vide avec porte-plateaux et plateaux)



Capacité de la chambre

18 o 24 L



Alimentation électrique

230 V | 50/60 Hz
2300 W



Consommation d'eau

0,3 L



Connectivité

Éléments compris :
Ethernet, USB, WiFi,
logiciel E-Memory et
E-Data

Technologies et solutions Euronda Pro System

Efficacité et fiabilité dans une seule plateforme

Les autoclaves Euronda Pro System sont développés sur une plateforme commune qui garantit l'efficacité, la fiabilité, la sécurité et la facilité d'utilisation de chaque modèle de la gamme.

Tous les autoclaves partagent la même structure modulaire, des systèmes de contrôle et de gestion optimisés, des accessoires et des pièces détachées.



Système modulaire

La conception modulaire des autoclaves Euronda Pro System permet de retirer facilement les panneaux latéraux, pour un entretien simplifié.

Séparateur air-eau

Il agit comme une protection pour la pompe à vide, empêchant les résidus de saleté, d'huiles lubrifiantes et de vapeur d'endommager ses composants internes, préservant ainsi son efficacité et sa fiabilité dans le temps.

Inspection System

Ce système d'inspection d'autoclaves, totalement conforme à la norme EN 13060, permet un nettoyage facile et rapide des réservoirs.

Dirt Control System

Le système de gestion de la saleté dans le circuit hydraulique permet une séparation précise des flux d'eau propre et d'eau sale afin que l'autoclave puisse continuer à fonctionner avec une efficacité maximale.

Conductivimètre

Le capteur de conductivité intégré surveille en permanence la qualité de l'eau, évitant ainsi tout dysfonctionnement dû à l'utilisation d'une eau inadaptée.

Système de refroidissement intelligent

Le système de refroidissement est équipé d'une sonde qui permet de gérer la pompe à vide de la manière la plus efficace possible, ce qui garantit une durée de vie et une efficacité accrues.

Générateur de vapeur

Garantit d'excellentes performances en termes de rapidité, de sécurité et de stérilisation. Il améliore la consommation d'eau en la calibrant en fonction de la charge et, en synergie avec les éléments chauffants, offre un séchage parfait.

Traçabilité

Les logiciels E-Memory et E-Data permettent de suivre et de gérer de manière exhaustive toutes les données du processus de stérilisation, en totale conformité avec la norme EN 13060, la sécurité opérationnelle et la protection juridique. Le logiciel E-Memory permet l'archivage, la gestion et la traçabilité des données sur un PC, tandis qu'E-Data connecte tous les appareils de la ligne au système de gestion de la clinique.

E-Bot

Notre assistant IA avancé soutient en temps réel les opérateurs dans la gestion de l'autoclave et du processus de stérilisation. De l'utilisation à la programmation, de la résolution des erreurs à l'entretien, E-Bot répond à tous les doutes de manière simple et immédiate.



Interface innovante

L'écran 7" d'E10 est doté d'une interface au langage visuel clair et fonctionnel, parfaitement intégrée au design essentiel de l'appareil, et d'une logique de fonctionnement simple, complète et immédiate.

E10 permet d'optimiser les flux de travail de manière intuitive, garantissant ainsi une liberté opérationnelle maximale.



Immédiat

L'interface d'E10 est intuitive et fonctionnelle, avec une installation guidée pas à pas, une traduction disponible en 28 langues, des descriptions sous les paramètres guidant l'utilisateur dans l'utilisation de l'appareil, et des cycles favoris toujours disponibles sur la page-écran principale, ce qui accélère la sélection, la personnalisation et la mise en route.



À portée de clic

L'interface d'E10 est conçue pour simplifier le travail en rendant toutes les sections principales facilement accessibles en quelques clics : le menu de navigation supérieur permet d'accéder à tout moment aux paramètres ou de choisir entre les cycles et les tests, en les démarrant rapidement d'un simple geste.





Centré sur l'utilisateur

E10 est convivial : le système de notification signale les cycles et les tests programmés ou toute erreur, guidant l'utilisateur dans leur résolution et dans l'entretien courant.

Menu de navigation fixe

Pour un accès rapide à la mise en route et à la programmation des cycles et des tests et aux paramètres de l'appareil.

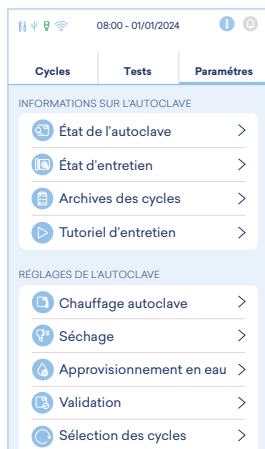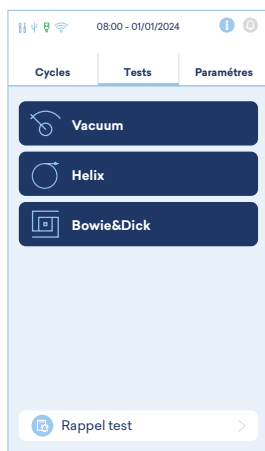

Header

La date, l'heure et toutes les informations de connectivité sont toujours disponibles dans la bande supérieure.




Infos

Un simple clic suffit pour accéder à toutes les informations relatives à l'appareil.

Notifications


La date, l'heure et toutes les informations de connectivité sont toujours disponibles dans la bande supérieure.

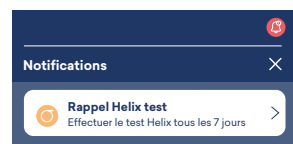

Homepage cycles

Un simple clic suffit pour accéder à toutes les informations relatives à l'appareil.

Profils d'utilisateurs

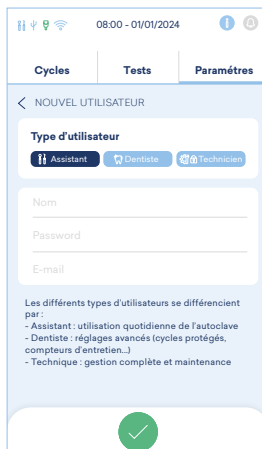


3 profils d'utilisateurs (assistant, dentiste et technicien) avec différents privilèges, pour une gestion entièrement personnalisée.

Cycles



Démarrage rapide des cycles et des tests

Un simple geste suffit pour lancer un cycle ou un test.

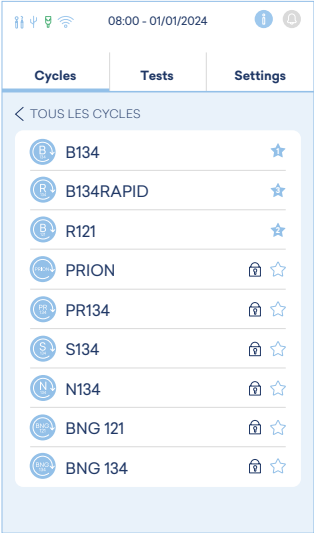

Cycles favoris sur la homepage

Il est possible de sélectionner des cycles favoris afin qu'ils soient toujours disponibles et qu'ils puissent être démarrés depuis la homepage.




Guide des cycles

En sélectionnant le type et la quantité de charge, E10 propose le cycle le plus adapté à chaque exigence.




Personnalisation des cycles

Le temps de séchage, le nombre et le type d'étiquettes ainsi que l'opérateur de chargement et de déchargement peuvent être personnalisés pour chaque cycle.

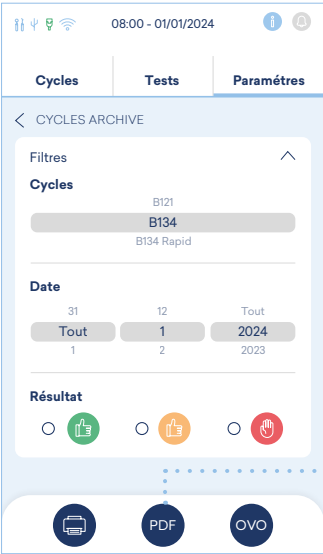


Archives des cycles exportables

E10 permet de générer un pdf avec les informations du cycle directement sur l'écran, en seulement quelques clics.

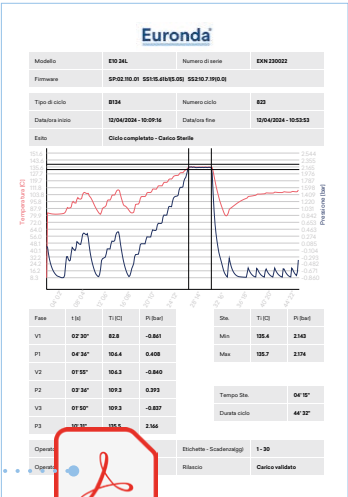

Entretien

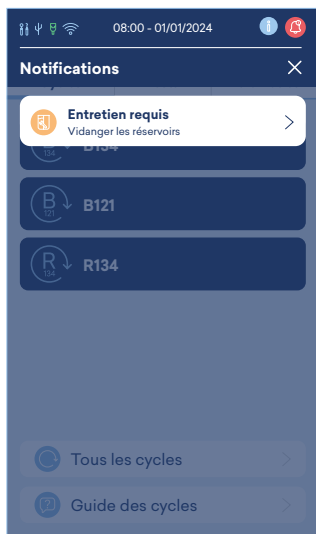

Avis d'entretien

Lorsque des opérations d'entretien sont nécessaires, E10 l'indique dans la section de notification.




État d'entretien

Les compteurs indiquent visuellement l'état d'entretien.



Remise à zéro des compteurs

Pour effectuer régulièrement des opérations d'entretien et en tenir toujours trace.

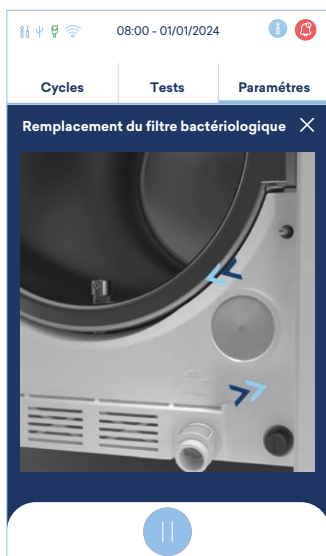

Tutoriel

Pour guider l'utilisateur dans les activités d'entretien courant.



Changement des filtres à air



Remplacement du filtre bactériologique



Changement du joint de porte



Installation des imprimantes



Nettoyage du filtre de la chambre



Nettoyage des réservoirs



Réglage du hublot



Déverrouillage de la goupille de sécurité



Cycles de stérilisation et programmes de test

Le modèle E10 offre la possibilité d'effectuer des cycles de type B, N et S, ainsi que des programmes de test (Vacuum, Helix, Bowie et Dick). Le menu permet de sélectionner 3 cycles de type B (121°, 134°, 134° Prion) et 2 cycles rapides (134° rapide, 134° Prion rapide), conformément à la norme EN 13060.

Les cycles rapides permettent de stériliser une petite charge (1 plateau et 0,6 kg de charge solide) avec une durée réduite de 30 % par rapport aux cycles standards. Il est également possible d'effectuer des cycles de type N (N134) et S (S134), qui peuvent être activés en saisissant un mot de passe.



Programmation des cycles

E10 permet de programmer le démarrage des cycles de stérilisation et des tests à l'heure souhaitée, optimisant ainsi le travail du cabinet dentaire. Cette fonction permet de programmer le test du vide avant l'ouverture du cabinet, avec la possibilité de lancer un autre test ou un cycle de stérilisation si nécessaire.



Rappel des tests

E10 permet de programmer un rappel pour l'exécution des programmes de test selon un intervalle de temps souhaité, afin de faciliter la gestion du cabinet dentaire et de toujours travailler avec une sécurité maximale.



Feedback visuel

Les LED situées dans le compartiment de la poignée servent de guide lumineux et fournissent un feedback immédiat sur l'étape du cycle de stérilisation (bleu : en cours, vert : stérile, rouge : non stérile, orange : stérile non sec).

Cycles de type B

	B 134		B 121		
Description	Cycle pour matériel solide, poreux ou creux, ensaché ou non ensaché		Cycle pour matériel solide ou poreux, ensaché ou non, particulièrement adapté à la stérilisation des matières plastiques, des turbines et des pièces à main		
Capacité de la chambre	18 L	24 L	18 L	24 L	
Température	134°C	134°C	121°C	121°C	
Pression	2,05 bar	2,05 bar	1,05 bar	1,05 bar	
Durée de la phase de stérilisation	4'	4'	20'	20'	
Durée de la phase de séchage	15'	15'	15'	15'	
Durée totale avec charge standard*	21'	24'	39'	40'	
Charge maximale solide/poreuse	4,5 kg / 1,5 kg	6 kg / 2 kg	4,5 kg / 1,5 kg	6 kg / 2 kg	

Cycles de type S et N**

Activables par mot de passe

	S 134		N 134		
Description	Stérilisation de produits solides ensachés ou non		Stérilisation de produits solides non ensachés		
Capacité de la chambre	18 L	24 L	18 L	24 L	
Température	134°C	134°C	134°C	134°C	
Pression	2,05 bar	2,05 bar	2,05 bar	2,05 bar	
Durée de la phase de stérilisation	4'	4'	4'	4'	
Durée de la phase de séchage	/	/	4'	4'	
Durée totale avec charge standard*	17'	17'	18'	18'	
Charge maximale solide/poreuse	4,5 kg	6 kg	4,5 kg	6 kg	

B 134 prion		B 134 - rapide		B 134 prion - rapide	
Cycle prion pour matériel solide, poreux ou creux, ensaché ou non ensaché		Cycle rapide pour matériel solide, poreux ou creux, ensaché ou non ensaché (1 plateau)		Cycle prion rapide pour matériel solide, poreux ou creux, ensaché ou non (1 plateau)	
18 L	24 L	18 L	24 L	18 L	24 L
134°C	134°C	134°C	134°C	134°C	134°C
2,05 bar	2,05 bar	2,05 bar	2,05 bar	2,05 bar	2,05 bar
18'	18'	3'30"	3'30"	18'	18'
15'	15'	4'	4'	4'	4'
35'	37'	20'	23'	35'	37'
4,5 kg / 1,5 kg	6 kg / 2 kg	0,6 kg / 0,2 kg	0,6 kg / 0,2 kg	0,6 kg / 0,2 kg	0,6 kg / 0,2 kg

** Les temps s'entendent hors phase de séchage. Le temps peut varier de $\pm 5\%$.*

*** Tous les cycles sont disponibles, sauf autre réglementation juridique nationale spécifique.*



Capacité de chargement

Pour E10, la charge maximale de matériel solide ensaché est de 4,5 kg pour la version 18 litres et de 6 kg pour la version 24 litres. E10 offre 3 solutions pour optimiser la charge à stériliser en fonction des différents besoins : le porte-plateaux standard comprenant 5 plateaux fournis avec l'autoclave, 1 porte-plateaux et 1 plan d'appui en option.



Porte-plateaux standard

Il est compatible avec des plateaux à section carrée, et conçu pour l'insertion de 5 plateaux en aluminium standard. Disponible en version 18 et 24 litres. Pivoté à 90°, il peut contenir 3 rangées de cassettes ensachées. 5 plateaux inclus.



Dimensions

Porte-plateaux de 18 l : 19,5 x 19,5 x 30 cm (lxhxp)


Plateau de 18 l : 18,5 x 2 x 28 cm (lxhxp)

Porte-plateaux de 24 l : 19,5 x 19,5 x 40 cm (lxhxp)

Plateau de 24 l : 18,5 x 2 x 38 cm (lxhxp)

Configurations proposées

Pour la version 18 l

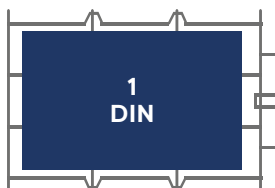


1 cassette de 1 DIN pour 3 compartiments

Total des cassettes : 3 de 1 DIN

Total DIN : 3 DIN

Charge à stériliser* : 2 kg

Pour la version 24 l

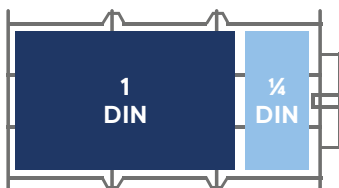


1 cassette 1 DIN + 1 cassette 1/4 DIN pour 3 compartiments

Total des cassettes : 3 de 1 DIN + 3 de 1/4 DIN

Total DIN : 3 DIN et 3/4

Charge pour la stérilisation* : 3,5 kg

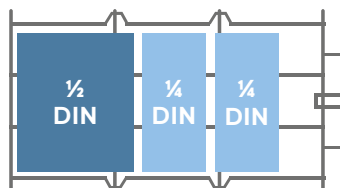

1 cassette 1/2 DIN + 2 cassettes 1/4 DIN pour 3 compartiments

Total des cassettes : 3 de 1/2 DIN + 6 de 1/4 DIN

Total DIN : 3 DIN

Charge pour la stérilisation* : 3,5 kg

* Charge recommandée et variable en fonction du type et du poids des cassettes utilisées

Accessoires en option

Pour les versions 24 I



Porte-plateaux pour cassettes


Le porte-plateaux convexe en acier permet l'insertion de 5 plateaux standard en aluminium ou, lorsqu'il est pivoté à 90°, de 4 cassettes ensachées de 1 DIN et de 4 cassettes de 1/4 DIN. Plateaux non compris.



Dimensions

19,5 x 22,5 x 40 cm (lxhxp)

Pour les versions 18 et 24 I

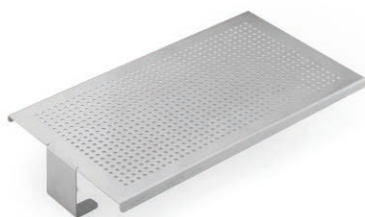

Plan d'appui universel

Support d'appui en acier adapté aux charges plus importantes. À installer directement dans la chaudière, après avoir retiré le porte-plateaux fourni.



Dimensions

Version 18 I : 19,5 x 5,5 x 25 cm (lxhxp)

Version 24 I : 19,5 x 5,5 x 35 cm (lxhxp)

Traçabilité complète et intégrée

Avec E10, la gestion et l'archivage des résultats du processus de stérilisation sont simplifiés grâce à un système de traçabilité numérique et papier. Tous les cycles de stérilisation sont enregistrés

sur USB (de série) et peuvent être transférés vers un PC via une connexion Ethernet ou WiFi (toutes deux de série).

Les 3 différents types d'imprimantes (en option) permettent d'imprimer les cycles sur du papier thermique ou des étiquettes.



Print Set 1

Imprimante interne avec papier thermique, pour ceux qui souhaitent accéder à l'enregistrement du cycle sur papier, tenir des registres.



Print Set 2

Imprimante interne pour étiquettes adhésives, pour ceux qui souhaitent étiqueter la charge en toute sécurité, avec la possibilité d'imprimer des codes-barres.



Print Set 3

Imprimante externe pour étiquettes adhésives, pour ceux qui ont besoin d'imprimer de grandes quantités d'étiquettes adhésives, même des codes-barres.



Traçabilité numérique

Conforme à la norme EN 13060, le système d'archivage est disponible soit sur USB pour transférer facilement toutes les données de l'autoclave vers l'ordinateur, soit via une connexion Ethernet ou WiFi.



Validation et libération de la charge

Cette fonction permet à l'utilisateur d'enregistrer sous format numérique la conformité du processus de stérilisation aussi bien pendant la phase de chargement que de déchargement. L'opérateur, après vérification de l'état et du séchage des sachets, de l'état des instruments et du respect des paramètres de stérilisation, peut valider la charge.



Imprimantes intégrables

Le système de traçabilité extensible permet d'installer trois différents types d'imprimantes, en fonction des exigences. Les Print Set 1 et 2 sont installés à l'avant de l'autoclave sans encombrement supplémentaire, tandis que le Print Set 3 est placé à l'extérieur de l'appareil.



E-Memory et E-Data

Pour une traçabilité totale du cabinet



E-Memory est le logiciel conçu pour l'archivage, la gestion et la traçabilité complète de tous les cycles et des données de stérilisation directement sur un PC. Il acquiert les données du processus de stérilisation de manière automatique, semi-automatique ou manuelle, les archive dans le PC où elles peuvent être facilement organisées, recherchées, imprimées ou envoyées par courriel.

Il permet également de tracer et de sélectionner toutes les informations relatives aux cycles effectués par les différents appareils (thermodésinfecteurs, bacs multifonctions, soudeuses et autoclaves) impliqués dans le processus de stérilisation.

Facile à consulter et à gérer, E-Memory permet en quelques clics l'envoi direct des cycles et des données sélectionnés au support technique. Il permet aussi de produire automatiquement un rapport et des certificats PDF avec en-tête, logo graphique et données personnelles.

Il peut être utilisé en combinaison avec le logiciel complémentaire E-Data, qui relie les appareils Euronda Pro System au système de gestion et permet d'enregistrer et de suivre les données des cycles de lavage, de conditionnement et de stérilisation.

Les deux logiciels sont disponibles pour les systèmes d'exploitation Windows et macOS et compatibles avec la plupart des programmes de gestion du marché.



Télécharger



Tests de contrôle



Helix test

Test de contrôle pour les autoclaves de classe B afin d'évaluer la capacité de pénétration de la vapeur dans les charges creuses.



Classification

Dispositif Médical de Classe I



Emballage

Paquet contenant une canule et 250 vireurs de contrôle



Bowie & Dick test

Test de contrôle pour les autoclaves de Classe B pour vérifier la capacité de pénétration de la vapeur dans les charges poreuses.



Classification

Dispositif Médical de Classe I



Emballage

Paquet con 10 pruebas



Prion test

Test de contrôle pour les autoclaves de Classe B. Calibré selon les paramètres de température, de temps et de pression considérés comme efficaces pour la stérilisation des cycles Prion à 134°.



Classification

Dispositif Médical de Classe I



Emballage

Paquet de 200 vireurs de contrôle



Intelligent

L'intelligence artificielle, intégrée par le savoir-faire Euronda, permet à E-Bot de fournir des réponses en temps réel, simplifiant chaque procédure et améliorant l'efficacité opérationnelle.



Interactif

L'interface, basée sur le système question-réponse, optimise le flux de recherche et d'acquisition des informations, guidant l'opérateur même dans les procédures les plus complexes.



Complet

Fournit un support immédiat sur le processus de stérilisation, l'utilisation de l'autoclave, l'entretien et le dépannage.



Immédiat

Accessible via n'importe quel smartphone, en flashant le Code QR spécifique qui apparaît sur l'écran de l'autoclave.



E10
Euronda | Pro System

E-Bot

Un support smart, une aide instantanée



Assistant IA avancé d'Euronda, développé pour soutenir en temps réel les opérateurs dans la gestion des appareils Euronda Pro System et du processus de stérilisation, en garantissant plus de sécurité, d'efficacité et de continuité opérationnelle.

E-Bot est toujours à portée de smartphone. Pour y accéder, il suffit de flasher le QR code qui apparaît sur l'écran de l'appareil : automatiquement en cas d'erreurs et d'avertissements de l'appareil, ou en sélectionnant la fonction dédiée dans le menu.

L'application est constamment mise à jour pour fournir des informations de plus en plus détaillées sur l'utilisation et les fonctions de l'appareil, mais aussi des informations intéressantes sur l'ensemble du processus de stérilisation, la traçabilité et les tests de contrôle.



Accès par code QR



Aquafilter Pro

Le système pour le traitement de l'eau hautes performances



Dispositif de production d'eau déminéralisée pour autoclaves, thermodésinfecteurs et bacs multifonctions, également indiqué en présence d'une dureté élevée et d'une conductivité importante de l'eau du réseau.

Grâce au système avancé de filtration à échange d'ions, il élimine les ions de calcium et magnésium, évitant ainsi la formation de résidus calcaires sur les instruments et les appareils auxquels il est connecté. Cela améliore les performances de lavage et de séchage des appareils connectés, en préserve l'efficacité dans le temps et en prolonge la durée de vie.

Aquafilter Pro permet d'alimenter plusieurs autoclaves en même temps. Il faut raccorder un dispositif Aquabox pour chaque autoclave auquel il est connecté.

Accessoires fournis

Test de dureté de l'eau, raccords de connexion à l'eau et tuyau d'arrivée d'eau déminéralisée.



Dimensions

18,5 x 55 cm (Ø x h)



Poids

7,5 kg (à vide)



Peut alimenter

Un ou plusieurs autoclaves simultanément ; ou bien, un seul thermodésinfecteur ou un seul bac multifonction



Production d'eau

100 L d'eau par heure



Pression d'alimentation

Min. 2 / max. 8,6 bar



Température de l'eau à l'arrivée

Min 4°C / max 30°C



Performant

Compact mais puissant : chaque résine à haute capacité permet de produire jusqu'à 1800 L d'eau traitée, garantissant une disponibilité continue pour les opérations quotidiennes.



Écologique

Il ne nécessite pas de raccordement au secteur et garantit une consommation d'eau extrêmement optimisée : toute l'eau à l'arrivée est filtrée et utilisée, sans produire d'eaux usées.



Facile

L'installation du déminéralisateur et le remplacement de la cartouche sont des opérations faciles et sûres, pouvant être réalisées en seulement quelques étapes, sans outils spécifiques.

Aquafilter 1 to 1

Le système de déionisation idéal pour un seul autoclave



Dispositif compact pour la production d'eau déionisée, conçu pour alimenter un seul autoclave de manière directe et contrôlée.

Peut être placé directement sur le plan de travail ou à l'intérieur du meuble, ainsi que fixé au mur.

Accessoires fournis

Deux résines échangeuses d'ions.



Dimensions

39 x 45,5 x 14,5 cm (l x h x p)



Poids

8,5 kg (à vide)



Peut alimenter

1 autoclave



Production d'eau

60 L d'eau par heure



Pression d'alimentation

Min. 0,5 / max. 8 bar



Compact

Conçu pour alimenter un seul autoclave, il combine des dimensions réduites et une installation flexible, au mur ou sur un plan de travail.



Simple

Un témoin lumineux indique le niveau de conductivité de l'eau, ce qui permet de savoir quand les résines doivent être remplacées.



Facile à installer

Grâce aux raccords rapides qui permettent la connexion simple et directe à l'autoclave et au réseau d'eau.

Aquadist

De l'eau distillée prête pour tous les besoins



Distillateur d'eau permettant d'obtenir de l'eau distillée par ébullition et condensation ultérieure de la vapeur.

Accessoires fournis

Récipient de collecte d'eau de 4 L, six filtres à charbon actif, flacon de 0,5 kg de détergents résiduels.



Dimensions

23 x 36 cm (Ø x h)



Poids

3,5 kg



Production d'eau

0,7 L d'eau par heure



Puissance absorbée

580 W



Pratique

Ne nécessite pas de raccordement direct au réseau d'eau : une solution autonome et polyvalente pour produire de l'eau distillée en cas de besoin.



Efficace

La capacité de 4 L et le récipient de collecte inclus permettent de gérer plusieurs cycles de stérilisation.



Fiable

Le système de distillation élimine les sels et les impuretés, garantissant une eau adaptée à l'utilisation en autoclave.

Accessoires pour systèmes de traitement de l'eau

Aquafilter Pro et Aquafilter 1 to 1



Aquaibox

Dispositif de raccordement du système pour le traitement de l'eau aux autoclaves Euronda Pro System. Un Aquaibox est requis pour chaque autoclave connecté.



Aquastop

Dispositif d'arrêt automatique, à raccorder au réseau d'eau pour interrompre l'alimentation en cas de fuite, en protégeant l'environnement de travail.



Embout

Pistolet avec tuyau extensible jusqu'à 80 cm, permet la distribution manuelle d'eau déminéralisée de manière pratique et précise.

Aquafilter Pro



Débitmètre

Dispositif de surveillance du volume d'eau traité dans les thermodésinfecteurs. Permet d'estimer la durée de vie résiduelle de la résine Aquafilter Pro, avant qu'elle n'épuise sa capacité de déminéralisation.

Caractéristiques techniques

	18 l	24 l
Dimensions d'encombrement	46 x 45,5 x 61 cm (lxhxp)	
Profondeur minimum du plan d'appui	50 cm	
Largeur minimum du plan d'appui	46 cm	
Espace minimum au-dessus du réservoir	30 cm	
Poids (machine vide avec porte-plateaux et plateau)	47,5 kg	50,5 kg
Poids par surface d'appui (réservoir plein et chambre avec charge maximale)	47,5 kg + 13 kg = 60,5 kg Charge sur chaque pied : 15,1 kg	50,5 kg + 14,5 kg = 65 kg Charge sur chaque pied : 16,2 kg
Tension d'alimentation	230 V 50/60 Hz	
Absorption	2 300 W – 10 A	
Consommation moyenne d'eau par cycle	0,3 l	
Capacité des réservoirs (eau propre/eau usée)	4/ 4 litres	
Bruit	50 dB	
Accessoires inclus	Porte-plateaux standard et 5 plateaux, tuyaux de vidange, éponge, poignée d'extraction du plateau, poignée pour le réglage de la porte, entonnoir	

Conformité aux normes harmonisées

- EN 13060
- EN 14971
- EN 61010-1
- EN 61010-2-040
- EN 61326
- EN 13445

Documentation


- Manuel de l'utilisateur
- Déclaration de conformité de la chambre
- Déclaration de conformité de l'autoclave
- Certificat de garantie
- Fiche d'installation
- Livret d'entretien

Certifications


- Dispositif Médical de classe IIb conforme au Règlement (UE) 2017/745 (MDR)
- Chambre conforme à la directive 2014/68/UE Entreprise certifiée : ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
- Modèle : SSUT\18L2023 et SSUT\24L2023

Fiche technique


Dimensions et encombrement (cm)

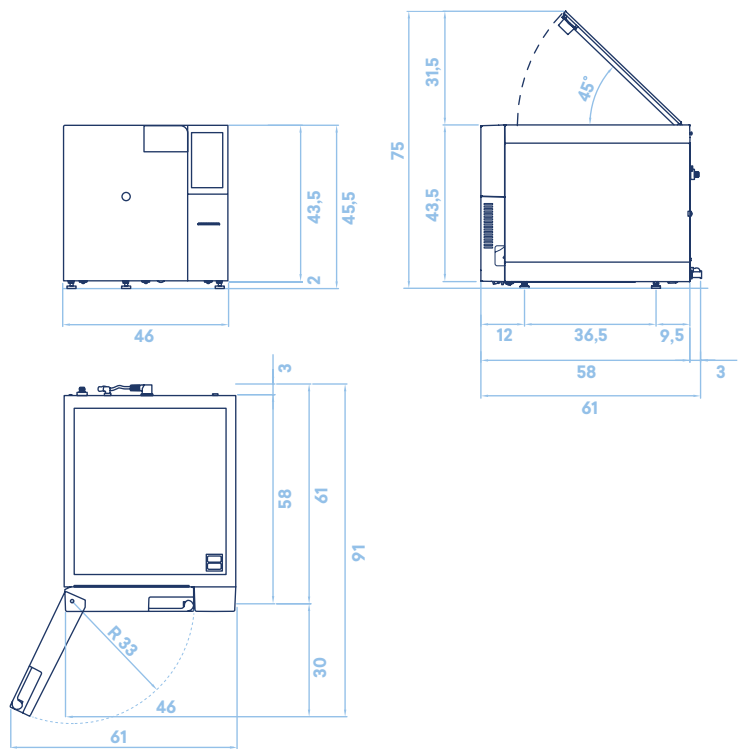

Dimensions de la chambre de 18 l (cm)

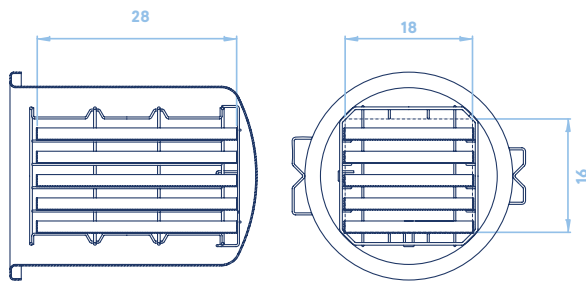

Dimensions de la chambre de 24 l (cm)

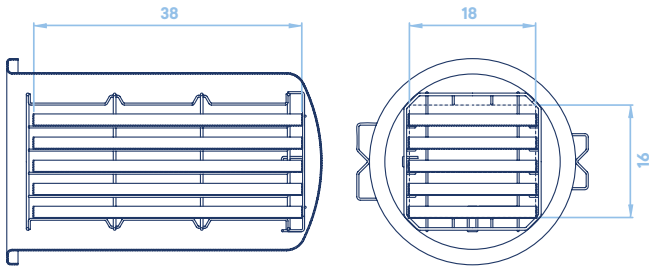

Notes

Notes

Euronda Spa® 2026

Ce catalogue ne peut être copié, reproduit ou scanné par quelque moyen que ce soit. Tous droits réservés.

Les photos, descriptions, caractéristiques techniques sont données à titre purement indicatif.

Même si les caractéristiques de base du produit sont conservées, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment dans le seul but d'effectuer des améliorations.

Siège principal

Euronda Spa
Via Chizzalunga 1,
36066 Sandrigo, Italia
t +39 0444 656111
f +39 0444 656199
m info@euronda.com
www.euronda.it

Filiale allemande

Euronda Deutschland GmbH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t +49 2505 9389 0
m info@euronda.de
www.euronda.de

Filiale française

Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t + 33 (0) 3 44 06 69 70
m info@euronda.fr
www.euronda.fr

Filiale espagnole

Identyd Ibérica S.L.
Calle Músico Antonio Rodríguez
de Hita, 12 Bajo 30007 Murcia, España
t 900102034
m info@euronda.es
www.euronda.es