

Eurosafe 170

FR

Nettoyage automatique,
extra large



Euronda®
Pro System

Eurosafe 170

Nettoyage automatique, extra large

6 Eurosafe 170

8 Lavage automatisé

Programmes de
thermodésinfection

12 Capacité de chargement

Chariots de chargement
Paniers et inserts
Adaptateurs
Compatibilité des accessoires

18 Traçabilité

E-Memory et E-Data

22 Détergents

24 Caractéristiques techniques

25 Fiche technique

Euronda Pro System

Product, Process, Protection



Nettoyage



Bacs à ultrasons

Eurosonic 4D
Eurosonic 3D
Eurosonic Energy



Bacs multifonctions

Eurosafe Smart



Thermodésinfecteurs

Eurosafe 170
Eurosafe 60

Conditionnement



Thermosoudeuses

Euromatic
Euroseal Valida
Euroseal
Euroseal Infinity

Euronda Pro System est le système de protection développé pour garantir un protocole de retraitement des instruments complet et efficace afin de protéger la sécurité des opérateurs, des patients et de l'environnement de travail.

La stérilisation est un procédé qui s'articule en plusieurs phases et son succès dépend de la bonne exécution de chaque étape, de la collecte au stockage. Grâce à la ligne Euronda Pro System, il est possible d'appliquer de façon simple, efficace et reproductible dans le temps un protocole de stérilisation avancé et traçable qui renforce la sécurité et optimise les ressources du cabinet.



Stérilisation



Autoclaves

E10
EXL
E9
E8



Traitement de l'eau

Aquaosmo
Aquafilter 1 to 1
Aquadist



Tests de contrôle



Systèmes de traçabilité



Spacieux

La chambre de lavage de 170 L en acier inoxydable AISI 316L, il peut accueillir jusqu'à quatre charges complètes d'un autoclave de 24 L, soit plus de 140 instruments, plus les pièces à main, les turbines, les pointes de détartreurs et les fraises.



Puissant

Les deux bras rotatifs sont disposés de manière à ce que chaque niveau de la vaste chambre de lavage soit atteint par un double flux d'eau puissant – par le haut et par le bas – pour un total de quatre points de lavage.



Performant

Le séchage, par l'injection d'air chaud en plusieurs points de la chambre de lavage, permet l'élimination complète des dépôts d'eau à l'extérieur et à l'intérieur de l'instrument à corps creux.



Accessoirisé

Équipé de série de tous les accessoires indispensables pour optimiser le chargement : chariot de chargement supérieur et inférieur, insert pour instruments, panier de 1-DIN, deux inserts pour plateaux à huit positions et porte-fraises.



Eurosafe 170

Nettoyage automatique, extra large

Thermodésinfecteur idéal pour les cliniques recevant un grand nombre de patients : il nettoie, désinfecte, rince et sèche les instruments en un seul processus automatisé, éliminant le besoin de nettoyage manuel. Il garantit d'excellents résultats grâce au système de lavage par injection avec bras indépendants pour chaque niveau et au séchage à air forcé qui élimine les dépôts d'eau.

Il permet de choisir trois cycles favoris parmi les 20 pré-réglés à associer aux boutons situés sous l'écran couleur de 3,5", permettant de les sélectionner facilement. En outre, il est possible de créer des cycles personnalisés en fonction du matériau à traiter, en paramétrant la durée et la température de lavage.

Ce modèle est équipé d'un adoucisseur intégré qui permet l'utilisation de l'eau du réseau et contrôle la régénération correcte des résines, en avertissant en cas de manque de sel, et d'un distributeur automatique de détergent.

Toutes les informations sur les cycles (temps, température, numéro de cycle) peuvent être transférées sur PC via USB de série et Ethernet en option et gérées via le logiciel E-Memory. Pour une traçabilité complète, il est également possible de connecter une imprimante thermique.

Accessoires fournis

USB, test de conductivité de l'eau, sel régénérant (1 kg), chariot de chargement supérieur, chariot de chargement inférieur, deux inserts pour plateaux à huit positions, panier de 1 DIN, insert pour instruments, porte-fraises.



Classification

Dispositif Médical
de Classe IIb



Dimensions

60 x 84 x 63 cm (l x h x p)



Poids

90 kg



Capacité de la chambre

170 L



Alimentation électrique

Monophasée : 220 V / 50 Hz
2700 W

Triphasée : 380 V / 50 Hz
5600 W



Connectivité

Éléments compris : USB
et logiciel E-Memory

En option : Ethernet avec
Datalogger et logiciel
E-Data

Lavage automatisé

Il désinfecte tout sans problèmes

Eurosafe 170 répond aux exigences de la norme EN ISO 15883 et permet de contrôler les paramètres de lavage (temps, concentration de détergent et température) pendant toutes les phases.

L'efficacité de la désinfection thermique est mesurée par la valeur A0, qui peut être obtenue par différentes combinaisons de température et de temps : plus la température est élevée, moins il faut de temps. La norme exige un A0 minimum de 600 pour la thermodésinfection des instruments chirurgicaux afin de garantir l'élimination des bactéries, des mycobactéries, des champignons et des virus. Eurosafe 170 permet de faire varier le paramètre A0 pour répondre à différents besoins et réglementations locales.





Pré lavage

Il s'effectue à l'aide d'eau froide dans le but d'éliminer les substances organiques et les salissures les plus superficielles et les plus grossières.



Lavage

Il s'effectue à des températures comprises entre 50 et 65 °C, en ajoutant un détergent enzymatique pour assurer un nettoyage parfait des instruments.



Rinçage

Cette opération a pour but d'éliminer tout résidu de détergent de la charge, qui a été utilisé à l'étape précédente.



Thermodésinfection

Elle s'effectue par l'action combinée de l'eau chaude à une température réglable jusqu'à 95° C et d'un temps variable de 1 à 10 minutes. Pendant la phase de chauffage, un deuxième agent chimique est injecté dans la chambre, ce qui empêche la corrosion de la charge et le dépôt de patines, tout en facilitant la phase de séchage successive.



Séchage

La dernière étape du processus est réalisée grâce à une distribution efficace de l'air à l'intérieur de la chambre afin d'obtenir, à l'ouverture de l'appareil, un matériel parfaitement sec et prêt à être emballé.



Personnalisable

Eurosafe 170 dispose de 20 cycles préréglés pour mieux répondre aux exigences de lavage des cliniques. En outre, il est possible de créer des cycles personnalisés avec différentes combinaisons de temps et de température.



Supérieur à la norme

Il garantit une valeur A0 minimum de 600 pour chaque cycle de thermodésinfection. Il est également possible de fixer une valeur supérieure à la norme et de contrôler ce paramètre en temps réel via l'écran.



Contrôlable

La porte transparente en verre trempé permet de contrôler le contenu pendant le lavage et d'intervenir en cas de mauvais positionnement de la charge à l'intérieur de la chambre.



Écologique

Le raccordement à l'alimentation en eau chaude permet de réduire l'énergie et le temps nécessaires au lavage. En outre, un bouton pratique permet de désactiver le séchage à air forcé, ce qui réduit la consommation d'énergie.



Programmes de thermodésinfection

Monophasé (220 V)

	Short P1	Standard P2	Intensive P3
Description	Cycle court sans prélavage, adapté aux charges exemptes de résidus organiques	Cycle incluant un prélavage, recommandé pour tous les types d'instruments et de salissures	Cycle incluant un prélavage, avec des temps plus longs et des températures plus élevées, adapté aux salissures plus résistantes
Durée totale du cycle	106'	120'	134'
Prélavage	✗	✓ pendant 2'	✓ pendant 2'
Lavage	50° C pendant 3'	60 °C pendant 3'	65 °C pendant 6'
Rinçage	✗	✗	✓
Thermodésinfection	90° C pendant 1'	90° C pendant 1'	90° C pendant 1'
Séchage	50 °C pendant 20'	50 °C pendant 20'	50 °C pendant 20'
Consommation d'eau	67 l	79 l	80 l
Consommation d'électricité	2,97 kWh	3,29 kWh	3,39 kWh

Triphasé (380 V)

	Short P1	Standard P2	Intensive P3
Durée totale du cycle	66'	80'	78'
Prélavage	✗	✓ pendant 2'	✓ pendant 2'
Lavage	50° C pendant 3'	60 °C pendant 3'	65 °C pendant 6'
Rinçage	✗	✗	✓
Thermodésinfection	90° C pendant 1'	90° C pendant 1'	90° C pendant 1'
Séchage	50 °C pendant 14'	50 °C pendant 14'	50 °C pendant 14'
Consommation d'eau	67 l	79 l	80 l
Consommation d'électricité	2,9 kWh	4 kWh	3,9 kWh

Capacité de chargement

Des solutions pour tous les besoins

Une gamme complète d'accessoires comprenant des chariots de chargement, des inserts, des paniers et des adaptateurs simplifie le travail de l'opérateur et permet d'obtenir d'excellentes performances en matière de nettoyage, de thermodésinfection et de séchage, en maximisant la capacité de chargement et en minimisant les gaspillages.




Des espaces optimisés


Conçu pour exploiter chaque centimètre de la chambre de lavage grâce aux deux niveaux de chargement spéculaires – supérieur et inférieur – qui assurent une répartition aisée de la charge.



Intégrable

Les nombreuses combinaisons de charges possibles s'adaptent aux besoins de chaque clinique et permettent de configurer Eurosafe 170 en fonction de vos exigences. Les accessoires disponibles répondent aux besoins de toutes les cliniques travaillant dans les domaines dentaire, de la chirurgie maxillo-faciale, de la chirurgie orale, de l'orthodontie et de la médecine générale.

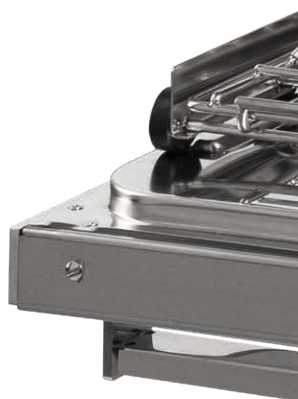


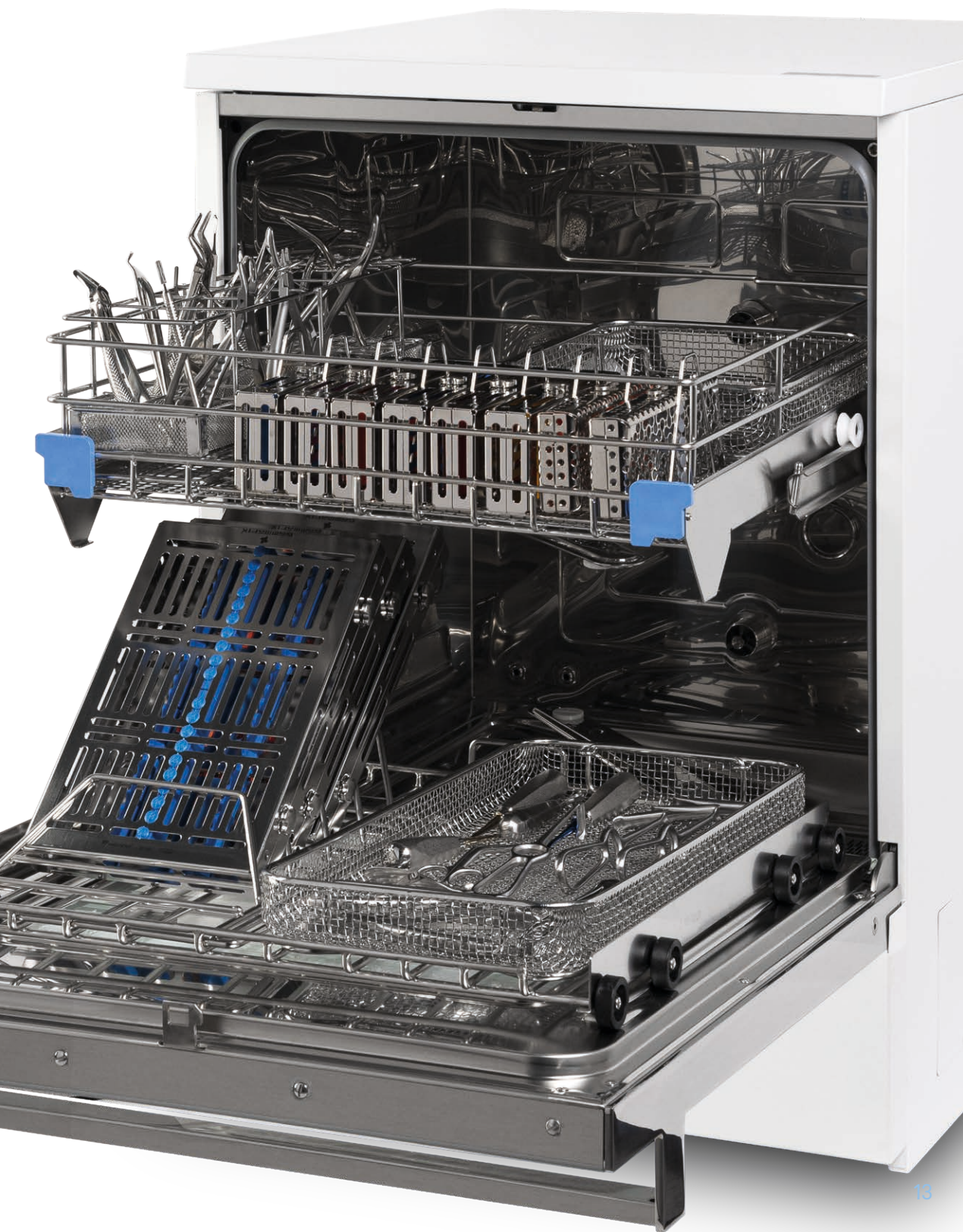

Chariots de chargement

Les 3 modèles de chariots de chargement répondent aux différents besoins des cabinets. Ils se caractérisent par des supports pour pièces à main, des injecteurs pour corps creux et des tuyaux d'aspiration. Ils peuvent être personnalisés avec des paniers et des inserts.

Fourni

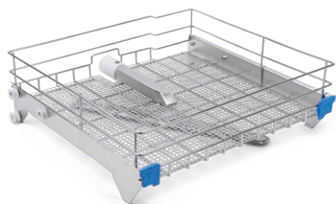

Chariot de chargement supérieur


Chariot supérieur avec bras rotatifs en acier inox adapté au positionnement des inserts pour cassettes et des paniers pour les instruments et les fraises.



Dimensions de la surface de chargement

51 x 9,5 x 48 cm (lxhxp)

Configurations proposées

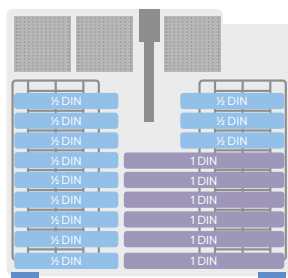


Accessoires :

- 2 inserts à 8 positions
- 3 porte-fraises

Charge :

- 6 cassettes de 1 DIN
- 12 cassettes de 1/2 DIN
- Fraises

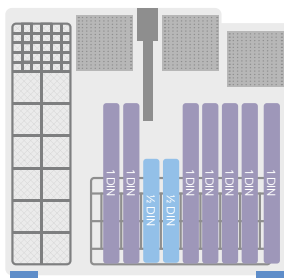


Accessoires :

- 1 insert à 8 positions
- 1 insert pour instruments
- 3 porte-fraises

Charge :

- 7 cassettes de 1 DIN
- 2 cassettes de 1/2 DIN
- Fraises
- Instruments

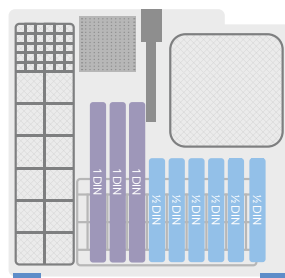

Accessoires :

- 1 insert à 8 positions
- 1 insert pour instruments
- 1 porte-fraises

Charge :

- 3 cassettes de 1 DIN
- 6 cassettes de 1/2 DIN
- Fraises
- Instruments

Fourni



Chariot de chargement inférieur


Chariot inférieur en acier inoxydable adapté aux inserts pour cassettes et paniers pour les instruments et les fraises.



Dimensions de la surface de chargement

50,5 x 4 x 49,5 cm (lxhxp)

Configurations proposées

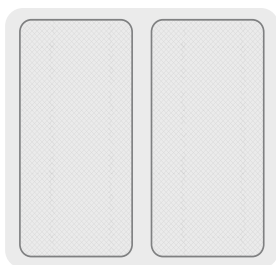


Accessoires :

- 2 paniers de 1 DIN

Charge :

- Instruments

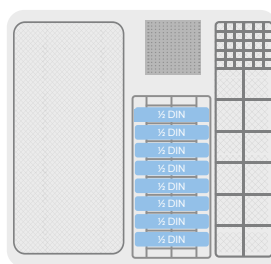


Accessoires :

- 1 panier de 1 DIN
- 1 insert à 8 positions
- 1 insert pour instruments
- 1 porte-fraises

Charge :

- 8 cassettes de ½ DIN (à la verticale)
- Fraises
- Instruments

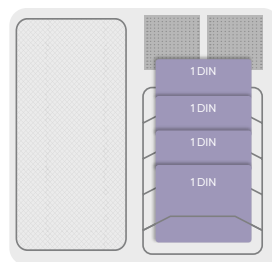

Accessoires :

- 1 panier de 1 DIN
- 1 insert à 4 positions
- 2 porte-fraises

Charge :

- 4 cassettes de 1 DIN (à la verticale)
- Fraises
- Instruments

En option



Chariot de chargement supérieur avec 16 supports pour pièces à main

Chariot équipé de raccords spéciaux pour la thermodésinfection des pièces à main.



Dimensions de la surface de chargement

51 x 4,5 x 48 cm (lxhxp)

Accessoires

Paniers et inserts




Insert pour instruments

Insert pour instruments en position verticale.
37 x 12 x 12 cm (lxhxp)




Porte-fraises

Panier adapté au lavage des fraises et des petites pièces.
10 x 4 x 10 cm (lxhxp)

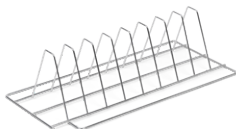

Insert à 8 positions

2 inserts pour plateaux et cassettes à 8 places (entraxe de 4 cm).
18 x 11 x 39 cm (lxhxp)

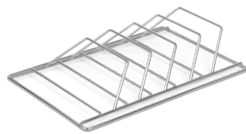

Insert à 4 positions

Insert pour plateaux et cassettes à 4 places (entraxe de 3,5 cm).
25 x 8 x 38,5 cm (lxhxp)



Insert à 2 positions

Insert pour plateaux et cassettes à 2 places (entraxe de 5 cm).
25 x 18 x 38,5 cm (lxhxp)



Panier de 1/2 DIN

Panier en fil métallique, adapté aux ciseaux, pincettes et miroirs.
25 x 5 x 24 cm (lxhxp)



Panier de 1 DIN

Panier en fil métallique, adapté aux grandes quantités d'instruments en vrac.
48,5 x 50 x 25 cm (lxhxp)

Adaptateurs



Pour pièces à main

Il permet un nettoyage en profondeur des canaux internes de la pièce à main grâce à la circulation de l'eau.



Pour pointes de détartrage

Composés de 1 filetage interne M3x0,35 et 1 M3,5x0,6, 1 filetage externe M3x0,5, 1 injecteur pour corps creux et 1 connecteur pour l'insertion de 3 adaptateurs.



Pour canules et corps creux en général

Composés de 1 filtre en acier inox, 1 bouchon de fermeture, 1 joint Ø 19-21 et 1 de Ø 14-17, 1 corps principal et 1 anneau supérieur.



Pour les turbines

Fabriqués en aluminium massif, ils sont disponibles pour une large gamme de modèles de turbines.

Compatibilité des accessoires

	Chariot de chargement supérieur	Chariot de chargement inférieur	Chariot de chargement supérieur avec 16 supports pour pièces à main
Panier de 1 DIN	✓	✓	✓
Insert à 8 positions	✓	✓	✓
Insert pour instruments	✓	✓	✓
Porte-fraises	✗	✓	✗
Insert à 4 positions	✗	✓	✗
Insert à 2 positions	✓	✓	✓
Panier de ½ DIN	✓	✓	✗
Adaptateurs pour pièces à main	✗	✗	✓
Adaptateurs pour pointes de détartreur	✗	✗	✓
Adaptateurs pour canules et corps creux en général	✗	✗	✓
Adaptateurs pour turbines	✗	✗	✓

Traçabilité

Contrôle total et sécurité des processus

Eurosafe 170 vous permet de garder une trace de tous les cycles de thermodésinfection effectués, en sauvegardant les données sur un dispositif USB. Elles peuvent également être transférées vers un PC via une connexion Ethernet ou imprimées sur du papier thermique à l'aide d'accessoires disponibles en option.



Imprimante thermique externe

Pour ceux qui veulent conserver leurs relevés du cycle sur papier.



Datalogger

Dispositif permettant de transférer les données du thermodésinfecteur vers un PC via une connexion Ethernet.





Connectivité avancée Euronda Pro System

Le système de connectivité intégré Euronda Pro System est conçu de manière à ce que tous les dispositifs, y compris Eurosafes 170, permettent une traçabilité complète de l'ensemble du processus de stérilisation.



Traçabilité des cycles

À la fin de chaque cycle de thermodésinfection, Eurosafes 170 génère un fichier qui rassemble toutes les données du processus en validant le chargement si les températures enregistrées sont conformes. Ce fichier peut être archivé à l'aide du logiciel E-Memory, facilement géré et accessible en seulement quelques clics.





Simple

Grâce à l'interface intuitive, aux commandes essentielles et aux filtres de recherche simples et immédiats, les logiciels E-Memory et E-Data sont pratiques et faciles à consulter.



Automatisés

Ils acquièrent automatiquement les données des appareils connectés via Ethernet ou WiFi et les archivent en toute sécurité avec une sauvegarde automatique, minimisant ainsi le risque d'erreurs.



Complets

Parfaits pour une gestion complète de tous les appareils impliqués dans le processus de stérilisation. Ils élaborent une liste ordonnée de cycles filtrée par appareil, modèle, numéro de série, opérateur, date et résultat.



Innovants

Les fonctions Watch Folder et Technical Support d'E-Memory permettent d'accéder à des rapports, des certifications et des alertes complets en un simple clic.



E-Memory et E-Data

Pour une traçabilité totale du cabinet



E-Memory est le logiciel conçu pour l'archivage, la gestion et la traçabilité complète de tous les cycles et des données de stérilisation directement sur un PC.

Il acquiert les données du processus de stérilisation de manière automatique, semi-automatique ou manuelle, les archive dans le PC où elles peuvent être facilement organisées, recherchées, imprimées ou envoyées par courriel.

Il permet également de tracer et de sélectionner toutes les informations relatives aux cycles effectués par les différents appareils (thermodésinfecteurs, bacs multifonctions, soudeuses et autoclaves) impliqués dans le processus de stérilisation.


Facile à consulter et à gérer, E-Memory permet en quelques clics l'envoi direct des cycles et des données sélectionnés au support technique. Il permet aussi de produire automatiquement un rapport et des certificats PDF avec en-tête, logo graphique et données personnelles.

Il peut être utilisé en combinaison avec le logiciel complémentaire E-Data, qui relie les appareils Euronda Pro System au système de gestion et permet d'enregistrer et de suivre les données des cycles de lavage, de conditionnement et de stérilisation.

Les deux logiciels sont disponibles pour les systèmes d'exploitation Windows et macOS et compatibles avec la plupart des programmes de gestion du marché.




Télécharger

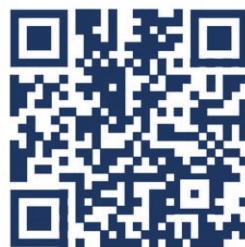

E10

Euronda | Pro System

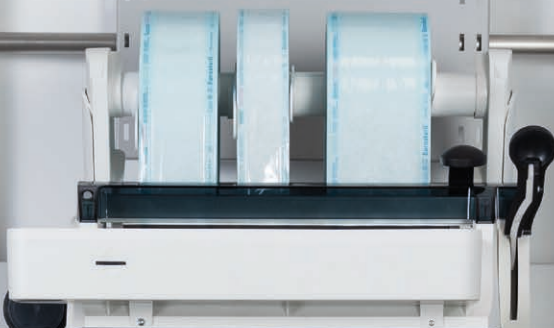

Détergents



Sanifizer Enzymatic

Détergent enzymatique pour la thermodésinfection. Adapté à l'élimination du sang, des résidus de tissus et des contaminants organiques des Dispositifs Médicaux.



Durée

36 mois



Emballage

Bidon de 5 litres



Sanifizer Neutralizer

Agent liquide à action neutralisante et nettoyante pour les systèmes de lavage automatique, les Dispositifs Médicaux et les pièces en verre de laboratoire. Il facilite le séchage, tout en réduisant la formation d'opacité.



Durée

36 mois



Emballage

Bidon de 5 litres



Sel régénérant

Sel pour le traitement de l'eau dans le thermodésinfecteur, empêche les dépôts de calcaire et assure la fonctionnalité du thermodésinfecteur.



Emballage

Sac de 1 kg

Caractéristiques techniques

Dimensions générales	60 x 84 x 63 cm (lxhxp)
Poids (machine vide avec paniers)	90 kg
Raccordement électrique	Monophasée 220 V / 50 Hz Triphasée 380 V / 50Hz
Puissance totale	2700 W (220 V) - 5600 W (380 V)
Puissance de la pompe	150 W
Bruit	< 70 dB(A)
Accessoires inclus	Clé USB, test de conductivité de l'eau, sac de sel régénérant (1 kg), chariot de chargement supérieur, chariot de chargement inférieur, 2 inserts à 8 positions, panier de 1 DIN, insert pour instruments, porte-fraises

Dispositifs de sécurité

- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre l'ouverture accidentelle de la porte
- Système de validation des processus

Respect des normes harmonisées

- 93/42/CEE et modifications et intégrations suivantes (Directive sur les Dispositifs Médicaux)
- 2006/42/CE (Directive Machines)
- 2014/30/UE (Directive sur la Compatibilité Électromagnétique)
- CEI EN 61010-1 (Sécurité)
- CEI EN 61010-2-040 (Sécurité)
- 2011/65/CE (RoHS II)

Documentation




- Manuel d'installation et d'utilisation
- Certificat de garantie
- Fiche d'installation

Certifications

- ISO 14971 (Gestion des risques des Dispositifs Médicaux)
- CEI 61326-1 (Compatibilité électromagnétique)
- ISO 15883-1 (Efficacité du lavage)
- ISO 15883-2 (Efficacité du lavage)
- ISO/TS 15883-5 (Efficacité du lavage)

Fiche technique

Dimensions et encombrements (cm)

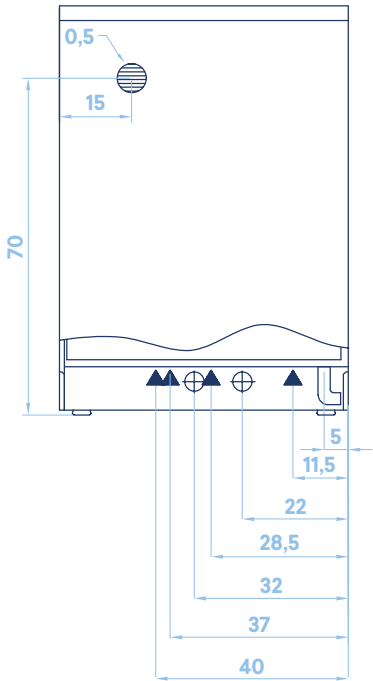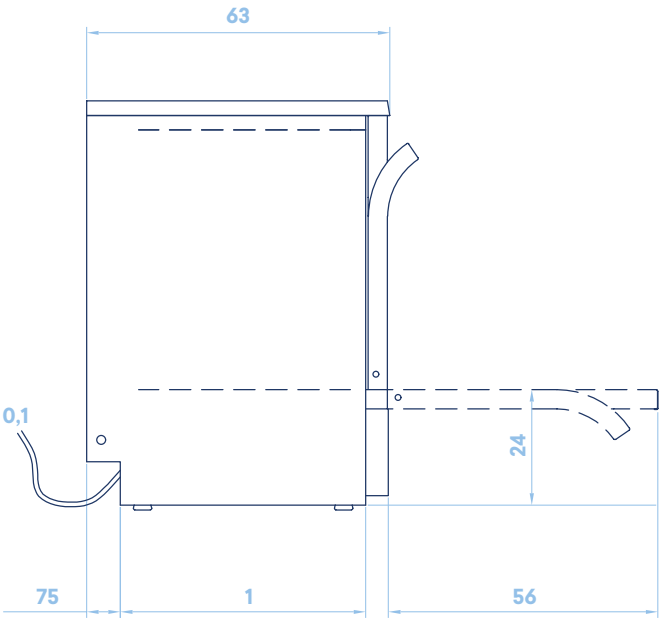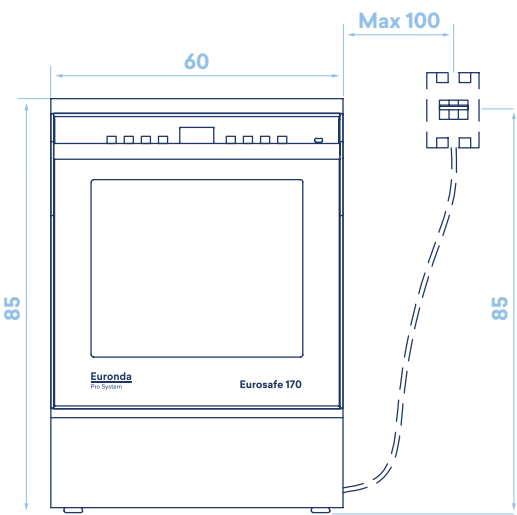

Euronda Spa® 2026

Ce catalogue ne peut être copié, reproduit ou scanné par quelque moyen que ce soit. Tous droits réservés.

Les photos, descriptions, caractéristiques techniques sont données à titre purement indicatif.

Même si les caractéristiques de base du produit sont conservées, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment dans le seul but d'effectuer des améliorations.

Siège principal

Euronda Spa
Via Chizzalunga 1,
36066 Sandrigo, Italia
t +39 0444 656111
f +39 0444 656199
m info@euronda.com
www.euronda.it

Filiale allemande

Euronda Deutschland GmbH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t +49 2505 9389 0
m info@euronda.de
www.euronda.de

Filiale française

Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t + 33 (0) 3 44 06 69 70
m info@euronda.fr
www.euronda.fr

Filiale espagnole

Identyd Ibérica S.L.
Calle Músico Antonio Rodríguez
de Hita, 12 Bajo 30007 Murcia
España
t 900102034
m info@euronda.es
www.euronda.es