

Compact et intelligent – l'Hygopac View

Des emballages stériles dans les règles de l'art – et selon les directives légales



Le nouvel Hygopac View – l'appareil compact pour un emballage stérile rapide, sûr et homologué

Emballer des instruments stériles n'a jamais été aussi simple et fiable.

À chaque emballage individuel, vous pouvez être certain que toutes les instructions relatives à la norme européenne EN ISO 11607-2 sont remplies.



Points importants :

- Un design compact pour un encombrement minimal dans la salle de traitement
- Fiable – grâce à ses composants haut de gamme pour une utilisation sans maintenance
- Concept d'utilisation intuitif pour une réalisation rapide et simple du processus d'emballage
- Validation facile grâce à un concept de validation intelligent et simple
- Flexibilité élevée de la documentation du processus par l'enregistrement sur une carte SD et une connexion réseau
- Utilisation intuitive et conviviale via l'écran tactile

Sachets de stérilisation pré-découpés ou en rouleau. La facilité Hygofol :

Gagnez du temps avec des emballages rapides, conformes aux normes et économisez de l'argent grâce aux rouleaux, désormais pourvus de points de repère pratiques pour une découpe optimale. Avec ou sans la station Hygofol qui peut être installée partout dans le cabinet.

Dispositifs médicaux de classe I.





Table à instruments et station Hygofol pour l'installation sur table



Station Hygofol fixée au mur



Hygopac Sealcheck, le test de soudure quotidien

Souder à l'aide d'un système complet.

Avec les accessoires et les sachets d'emballage du système Hygopac, vous réalisez votre travail avec succès. Le test de soudure Hygopac Sealcheck permet de contrôler chaque jour la qualité de celle-ci, en un clin d'œil. Cela contribue ainsi à encore plus de sécurité.

L'**Hygopac View** représente la nouvelle génération de la soudeuse à défilement.

Avec sa conception extrêmement compacte, Hygopac View combine un design moderne, fonctionnel à un concept d'utilisation intuitif. De cette manière, le processus d'emballage pour le retraitement quotidien des produits médicaux est simple et rapide.



Garder le contrôle grâce à VistaSoft Monitor



Points importants :

- Surveillance de l'état de l'appareil via le réseau
- Enregistrement automatique des cycles de soudure effectués
- Sécurité de fonctionnement augmentée
- Aide rapide en cas d'intervention SAV



Scannez-moi

Hygopac

Soudeuse mécanique pour le conditionnement des emballages de stérilisation transparents



Hygopac View

Une soudeuse à défilement homologuée selon la norme EN ISO 11607-2



Caractéristiques techniques	Hygopac	Hygopac View
Tension	230 V	230 V / 1 ~
Fréquence secteur	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Puissance électrique	550 W	> 900 W
Puissance de chauffe	2 × 250 W	2 × 400 W
Temps de chauffe	env. 3 min	env. 3 min
Température de soudage	jusqu'à 240 °C	jusqu'à 210 °C
Réglage de la température	en continu	par échelon de 5 °C
Rapidité de soudage	5,3 m/min	3 niveaux réglables (5 m/min, 7 m/min, 9 m/min)
Largeur de soudure	9 mm	13 mm(17 mm)*
Poids	7,2 kg	7,8 kg
Dimensions (H × l × P)	160 × 435 × 135 mm	170 × 370 × 140 mm
Gain de temps par rapport aux soudeuses à barres	•	•
Écran tactile		•
Validation		
Surveillance automatique du processus (température de soudage, rapidité de soudage, pression de serrage)		•
Enregistrement des paramètres de soudure		•
Enregistrement automatique des données sur carte SD ou via le réseau		•

* Avec coussin d'air



reddot design award



Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les notices de nos produits.
Produits non remboursés par les organismes de santé.

DÜRR DENTAL FRANCE
71 rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre
France
www.duerrdental.com
infodurrrfr@duerrdental.com



Scannez-moi



LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME